



CÓMO USAR LA MASCARILLA FFP2 (COVID-19)

Use de manera correcta la mascarilla FFP2 para que la protección frente aerosoles sea la esperada.

- Las mascarillas FFP2 son especialmente útiles para proteger a las personas vulnerables en espacios interiores o masificados. Se entiende que son colectivos vulnerables a la COVID-19: los mayores de 60 años, embarazadas e inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca.
- Para garantizar la efectividad de la protección de las mascarillas FFP2, éstas deben quedar correctamente ajustadas al contorno de la cara, ofreciendo un perfecto sellado entre la piel y el borde de la mascarilla que evite el paso del aire sin estar previamente filtrado.

Lavarse las manos




Lávate las manos antes de ponerte la mascarilla, para colocártela con las manos limpias y secas.

Revisar estado de la mascarilla



Revisa la mascarilla antes de ponértela para comprobar que esté en perfecto estado, si está dañada, sucia o húmeda sustitúyela por otra.

Colocarse la mascarilla

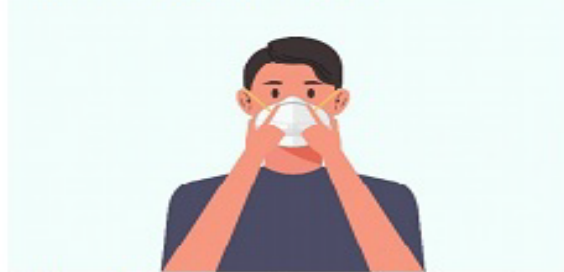

Ajústala herméticamente al rostro, cubriendo al nariz, boca y barbilla con el contorno de la mascarilla bien sellado a la piel, sin que queden huecos por los que pueda entrar el aire sin ser filtrado.

Quitarse la mascarilla



Lávate las manos antes de tocar la mascarilla, con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica, cogiendo la mascarilla por las gomas para retirarla de atrás hacia adelante sin tocarla por la parte interior.

Desechar la mascarilla



No se coloque la mascarilla cuando las gomas no sujeten con firmeza o la mascarilla no se ajuste correctamente al rostro. No la use cuando esté rota, sucia y se encuentre húmeda o mojada.

Reutilizar la mascarilla



El tiempo máximo de reutilización de una mascarilla FFP2 será de 40h, 5 jornadas de trabajo, en entornos laborales no sanitarios ni hospitalarios, siempre que se encuentre limpia, seca y en perfecto estado de uso. Entre usos se guardará en un recipiente desinfectado y seco.